




FILT'RAY™ Douche Anti-légionelle

Filtre antibactérien pour production d'eau exempte de micro-organismes grâce à une technologie innovante de filtration par fibre creuse.

Ce dispositif de filtration terminale constitue une protection efficace contre les légionelles de l'eau.

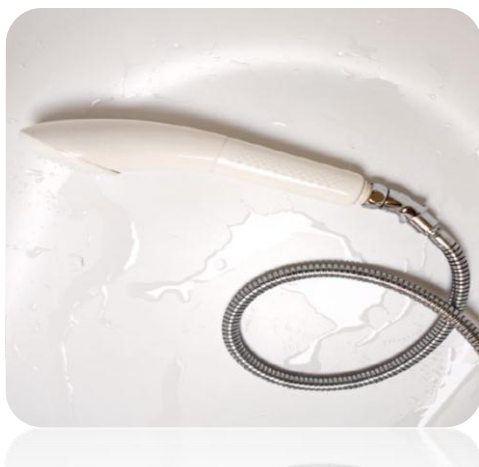

EFFICACE

Technologie brevetée.

PRATIQUE

Embout universel permettant une installation en quelques secondes quel que soit le type de flexible.

SURE

Conforme aux normes hospitalières les plus strictes.



- Rétention des légionelles validée jusqu'à 60 jours
- Test d'intégrité des membranes et contrôle d'étanchéité effectués individuellement
- Matériaux sélectionnés répondant aux exigences de la Pharmacopée Européenne et US et/ou FDA
- Composants utilisés fabriqués et assemblés en France

| Caractéristiques | FILT'RAY Douche |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de membrane | Fibre creuse en polysulfone |
| Corps du produit | ABS de grade médical |
| Seuil de coupure | 0,1 µm |
| Débit de filtration | 16 L/min à 3 bars |
| Conditions maximales d'utilisation | 6 bars à 60 °C 70 °C pendant 30 minutes 100 ppm de chlore actif pendant 12 h |

INSTALLATION DU POMMEAU DE DOUCHE FILT'RAY



1. Retirer le pommeau de douche de son emballage stérile.

2. Dévissez votre pommeau de douche actuel du flexible de douche.



3. Vissez à la place le pommeau de douche FILT'RAY.



Route de Renault
78410 Flins-sur-Seine – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 95 79 50
Fax : +33 (0)1 30 95 54 55
info@aqua-tools.com